


Registrazione ECG Ergometrico with the Welch Allyn CardioPerfect™ PCE-100 e ECG PCE-200 Ergometrico

1. Sistemare gli elettrodi

Estremità elettrodi

Sotto la clavicola o sopra la cresta scapolare, e appena al di sopra della spina iliaca superiore posteriore e della cresta iliaca.

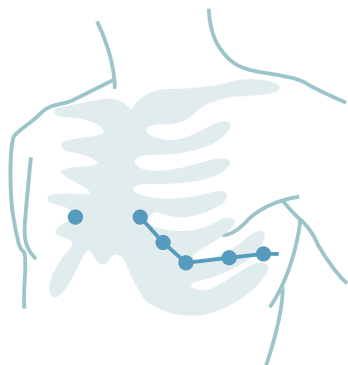

Elettrodi precordiali

- V1 IV spazio intercostale, al margine destro dello sterno
- V2 IV spazio intercostale, al margine sinistro dello sterno
- V3 V costola, fra le derivazioni V2 e V4
- V4 V spazio intercostale, sulla linea medioclavicolare a sinistra
- V5 Linea ascellare anteriore sinistra, allo stesso livello in orizzontale di V4
- V6 Linea medioascellare sinistra, allo stesso livello in orizzontale di V4

2. Crea/seleziona un paziente

Creare un nuovo paziente

1. Nel menu **File**, scegliere **Nuovo** e cliccare **Paziente**
2. Inserire le informazioni nella carta del paziente

Selezionare un paziente dal database:

1. Nella casella **Cerca**, digitare parti del nome del paziente o il suo numero
2. Fare Clic sul tasto **Vai**
3. Fare Clic sul paziente di cui si desidera registrare l'esame

3. Creare un nuovo ECG

1. Nel menu **File**, scegliere Nuovo e fare clic su **ECG Ergometrico**

2. Inserire le informazioni nella tabella di **Protocollo**
3. Fare clic su OK. Apparirà il monitor di tempo reale

4. Accendere il registratore

(non è necessario per i registratori PRO)

Se la luce di alimentazione è

- Verde: iniziare a registrare
- Rossa: cambiare la batteria

5. Registrazione ECG Ergometrico

- Fare clic su **Avvio** per dare inizio all'esame
- Fare clic su **Fase Successiva** per passare alla fase seguente del test
- Fare clic su **Stop** per interrompere la registrazione
- In caso di emergenza, usare il tasto **Arresto di Emergenza** per un arresto immediato della pedana mobile o bicicletta. Il monitoraggio dell'ECG del paziente e le stampe non verranno interrotte.



6. Nel corso della registrazione

Nel corso della registrazione è possibile:

- Misurare la pressione arteriosa
- Rilevare un evento
- Aggiungere un commento
- Applicare un filtro di riferimento per ridurre l'oscillazione del riferimento di base
- Stampare un rapporto 2x6
- Inserire (parti di) interpretazione



7. Spegnimento del registratore

Cosa succede?

- L'ECG viene salvato automaticamente
- Il monitor in tempo reale si arresta
- I risultati appaiono nello spazio di lavoro

Suggerimenti per l'uso

- Nel corso dell'ECG in tempo reale, è possibile selezionare varie configurazioni delle derivazioni, grafici di velocità, sensibilità, tendenza e il punto di misurazione ST
- Il filtro notch annulla il rumore prodotto dalle interferenze di rete

Distributore per l'Italia

CORIOS
NETWORK

Corios s.c.
via Della Pace, 14, 20098 S. Giuliano Milanese (MI)
Tel: 02 98240506 Fax: 02 98491761

WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™

Welch Allyn European Customer Service
Navan Business Park, Dublin Road, Navan, County Meath, Ireland
dall'Italia Tel: +39 02 69 682 425 Fax: +39 02 69 633 697
www.welchallyn.com/cardiocontrol