


# Registrera EKG med Welch Allyn Cardio Perfect™ PC-baserad Arbets-EKG

## 1. Elektrodplacering

### Extremitetselektroder

Nedanför klavikeln eller ovanför crista scapulae och strax ovanför spina iliaca superior posterior eller crista iliaca.

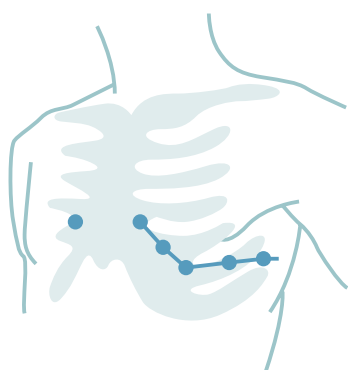

### Prekordiala elektroder

- V1 4:e interkostalrummet, på högra sternalkanten.
- V2 4:e interkostalrummet, på vänstra sternalkanten
- V3 5:e revbenet mellan avledning V2 och V4
- V4 5:e interkostalrummet, på den vänstra medioclavicularlinjen
- V5 Vänstra främre axillarlinjen, horisontellt i nivå med V4
- V6 Vänstra mellersta axillarlinjen, horisontellt i nivå med V4

## 2. Skapa/välja patient

Skapa ny patient:

1. **Peka** på **Ny** och klicka **Patient** i Dropp meny
2. Mata in uppgifterna på patientkortet

Välja patient:

1. Mata patientens namn eller personnummer i Sökfältet
2. Klicka på knappen Sök
3. Klicka på den patient du vill aktivera

## 3. Förbered nytt EKG

1. Peka på Ny och klicka på Arbets-EKG i Dropp meny
2. Välj protokoll och skriv in önskad data
3. Klicka på OK. Realtidsmonitorläget aktiveras på skärmen

## 4. Slå på strömbrytaren

(krävs inte på PRO-modellen)

Om indikatorlampan lyser

- Grönt: starta inspelningen
- Rött: byt batteriet

## 5. Spela in EKG


- Klicka på knappen Spela in för att registrera arbets-EKG, 12 avledningar
- Klicka på Nästa fas för att flytta till nästa fas av testet
- Klicka på knappen Avsluta för att avsluta
- Tryck på knappen Nödstopp i en nödsituation, detta stoppar omedelbart cykeln eller löpbandet. Förutsatt att dessa är sammankopplade med programmet. Utskrift och monitorering av patientens EKG avbryts inte



## 6. Under inspelningen

Under inspelningen kan du:

- Mäta blodtrycket
- Markera händelser
- Lägga till kommentarer
- Aktivera baslinjefilter för att reducera baslinjevandring
- Skriva ut 2x6 rapporter
- Lägga till egen tolkning
- Läs av programmets noterade arytmier samt lägga till egna

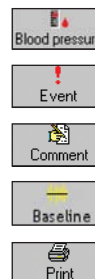

## 7. Slå av strömbrytaren

Vad händer?

- Registrerat EKG sparas automatiskt
- Monitorläget avslutas
- EKG-datan visas i testfönstret

## Användartips

- Medan Realtidsmonitorn är aktiverad kan du ändra avledningarnas hastighet, sensitivitet, ordning, visa trendgrafer, värdefull ST-data samt jämförelsekomplex
- Fliken Historik ger dig en unik tillbakablick av inspelningen. Du väljer enkelt vilken avledning som ska visas

Welch Allyn Sverige, Verkstadsgatan 12, 263 39 Höganäs, Sverige  
Tel: +46 (0) 42 33 02 20 Fax: +46 (0) 42 33 32 10

www.welchallyn.se

**WelchAllyn**®

Advancing Frontline Care™