


Registrazione di ECG con l'ECG a Riposo Welch Allyn CardioPerfect™ PCR-100 PC-based

1. Sistemare gli elettrodi

Elettrodi Estremità

Caviglie e polsi

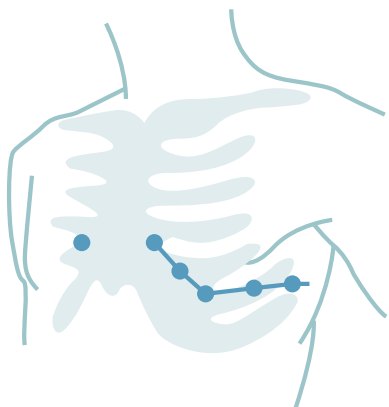

Elettrodi precordiali

- V1 IV spazio intercostale, al margine destro dello sterno
- V2 IV spazio intercostale, al margine sinistro dello sterno
- V3 V costola, fra le derivazioni V2 e V4
- V4 V spazio intercostale, sulla linea medioclavicolare a sinistra
- V5 Linea medioascellare sinistra, allo stesso livello in orizzontale di V4

2. Crea/seleziona un paziente

Creare un nuovo paziente

1. Nel menu **File**, scegliere **Nuovo** e cliccare **Paziente**
2. Inserire le informazioni nella carta del paziente

Selezionare un paziente dal database:

1. Nella casella **Cerca**, digitare parti del nome del paziente o il suo numero
2. Fare Clic sul tasto **Vai**
3. Fare Clic sul paziente di cui si desidera registrare l'esame

3. Creare un nuovo ECG

1. Nel menu **File**, scegliere **Nuovo** e fare clic su **ECG**

2. Inserire la specialità, con riferimento al medico curante e alla serie di derivazioni
3. Fare clic su OK. Apparirà il monitor di tempo reale

4. Accendere il registratore

(non è necessario per registratori PRO)

Se la luce di alimentazione è

- Verde: iniziare la registrazione
- Rossa: cambiare la batteria

5. Registrazione ECG

- Cliccare su **Registra** per avviare l'ECG a riposo a 12 derivazioni
- Cliccare su **Ritmo per iniziare** a registrare fino ad un massimo di 300 secondi
- Cliccare **Evento** per evidenziare aree di interesse
- Cliccare di nuovo su **Ritmo per arrestare** la registrazione
- Cliccare su **Cancella** per cancellare



6. Spegnimento del Registratore

Cosa succede?

- L'ECG viene salvato automaticamente
- Il monitor in tempo reale si arresta
- I risultati appaiono nello spazio di lavoro

Suggerimenti per l'uso

- E' possibile cancellare una registrazione e iniziare una nuova senza disconnettere il monitor in tempo reale
- Nel corso dell'ECG in tempo reale, è possibile selezionare configurazioni di derivazione differenti, grafici di velocità, sensibilità e varitracciati del ritmo
- L'opzione pre-innesco aiuta a cogliere eventi salvando 5 secondi di traccia già prima dell'inizio della registrazione
- Nel corso della registrazione, la frequenza cardiaca è mostrata nell'angolo a destra del monitor tempo reale
- Il filtro notch annulla il rumore prodotto dall'interferenza di rete

Distributore per l'Italia

CORIOS
NETWORK

Corios s.c.

via Della Pace, 14, 20098 S. Giuliano Milanese (MI)
Tel: 02 98240506 Fax: 02 98491761

WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™

Welch Allyn European Customer Service
Navan Business Park, Dublin Road, Navan, County Meath, Ireland
dall'Italia Tel: +39 02 69 682 425 Fax: +39 02 69 633 697
www.welchallyn.com/cardiocontrol