


# Registrering av EKG med Welch Allyn CardioPerfect™ PCR-100 for PC-basert hvile-EKG

## 1. Fest elektrodene

Elektroder på ekstremiteter  
Ankler og håndledd

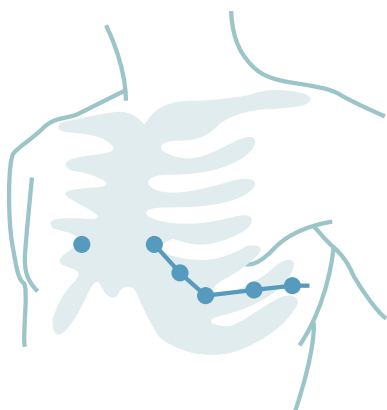

Prekordiale elektroder

- V1 4. interkostale rommet, på høyre side av sternum
- V2 4. interkostale rommet, på høyre side av sternum
- V3 5. ribben mellom elektrodene V2 og V4
- V4 5. interkostale rommet, på midtlinjen til venstre krageben
- V5 Venstre, fremre aksillærlinje på høyde med V4
- V6 Venstre, midtaksillærlinje på høyde med V4

## 2. Opprett eller hent pasient

Oppretting av ny pasient:

1. Pek på **Ny** i filmenyen og klikk på **Pasient**
2. Skriv opplysninger i pasientens kort

Hent pasient fra databasen:

1. I søkeboksen **skriver** deler av pasientens navn eller nummer
2. Klikk på knappen **Søk**
3. Klikk på den aktuelle pasienten

## 3. Oppretting av ny EKG

1. Pek på **Ny** i filmenyen og klikk på **EKG**
2. Skriv inn spesialitet, lege og elektrodesett
3. Klikk OK. Real-tid skjermen vises

## 4. Slå på opptakeren

(gjelder ikke for PRO skriver)

Når strømforsyningslampen er

- Grønn: Start registreringen
- Rød: Bytt batteriet

## 5. Registrer EKG

- Klikk på knappen **Ta opptak** for å starte en hvile-EKG med 12 avledninger
- Klikk på knappen **Rytme** for å starte en registrering på opp til 300 sekunder
- Klikk på knappen **Hendelse** for å merke av områder som er av interesse
- Klikk en gang til på knappen **Rytme** for å stoppe registreringen
- Klikk på knappen **Avbryt** for å avbryte



## 6. Slå av opptakeren

Hva skjer?

- EKG blir automatisk lagret
- Real-tid skjermen blir slått av
- Resultatene vises i arbeidsfeltet

## Brukertips

- En registrering kan annulleres og en ny startes uten å gå ut av real-tid skjermen
- Under visningen av EKG i sann tid kan det velges ulike elektrodekonfigurasjoner, papirhastighet, sensitivitet og ulike rytmeutsnitt
- Alternativet pre-trigger er til hjelp ved hendelser gjennom lagring av 5 sekunders kurve før registreringen startes
- Under registreringen vises hjerterytmen i høyre hjørne av sanntidsmonitoren
- Et filter fjerner støy som skyldes nettforsyningen

Medinor ASA, Nils Hansens Vei 4, PO Box 94 Bryn, Oslo 0611, Norway  
Tel: 00 47 22076500 Fax: 00 47 22076505 Email: medinor@medinor.no

Welch Allyn European Customer Services,  
Navan Business Park, Dublin Road, Navan, Co. Meath, Republic of Ireland  
Tel: 00 353 46 90 67790 Fax: 00 353 46 90 67754

[www.welchallyn.com/cardiocontrol](http://www.welchallyn.com/cardiocontrol)

**WelchAllyn**®

Advancing Frontline Care™

©2003 Welch Allyn, Inc. SM2566NO RevB