


Registrera EKG med Welch Allyn Cardio Perfect™ PC-baserad vilo-EKG

1. Elektrodplacering

Extremitets elektroder
Vrister och handleder

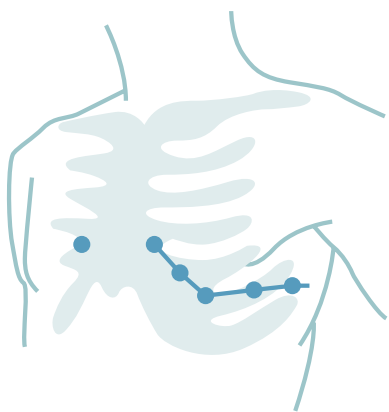

Prekordiala elektroder

- V1 4:e interkostalrummet, på högra sternalkanten.
- V2 4:e interkostalrummet, på vänstra sternalkanten
- V3 5:e revbenet mellan avledning V2 och V4
- V4 5:e interkostalrummet, på den vänstra medioclavicularlinjen
- V5 Vänstra främre axillarlinjen, horisontellt i nivå med V4
- V6 Vänstra mellersta axillarlinjen, horisontellt i nivå med V4

2. Skapa/välja patient

Skapa ny patient:

1. Peka på **Ny** och klicka **Patient** i **Dropp meny**n
2. Mata in uppgifterna på patientkortet

Välja patient:

1. Mata patientens namn eller personnummer i Sökfältet
2. Klicka på knappen Sök
3. Klicka på den patient du vill aktivera

3. Förbered nytt EKG

1. Peka på **Ny** och klicka på Arbets-EKG på **Filmeny**n
2. Mata in information på Protokollfliken
3. Klicka på OK. On-line monitorn visas på skärmen

4. Slå på strömbrytaren

(krävs inte på PRO-modellen)

Om indikatorlampan lyser

- Grönt: starta inspelningen
- Rött: byt batteriet

5. Spela in EKG

- Klicka på knappen Spela in för att registrera vilo-EKG, 12 avledningar
- Klicka på knappen Rytm för att registrera EKG upp till 300 sekunder
- Klicka på knappen Händelse för att markera intressanta tidpunkter
- Klicka på knappen Rytm en gång till för att avsluta inspelningen
- Klicka på knappen Avbryt för att avbryta inspelningen



6. Slå av strömbrytaren

Vad händer?

- Registrerat EKG sparas automatiskt
- Monitorläget avslutas
- EKG-datan visas i testfönstret

Användartips

- Du kan avbryta en inspelning och påbörja en ny utan att stänga monitorläget emellan
- Medan Realtidsmonitorn är aktiverad kan du ändra avledningarnas hastighet, sensitivitet, ordning och val av rytmer.
- Trigger funktionen hjälper dig att fånga en händelse genom att minnas fem sekunder bakåt i tiden.
- Under inspelningen visas pulsen i skärmens högra övre hörn
- Nätfiltret reducerar eventuella växelströmsstörningar
- Tremorfilter reducerar eventuella muskelstörningar

Welch Allyn Sverige, Verkstadsgatan 12, 263 39 Höganäs, Sverige
Tel: +46 (0) 42 33 02 20 Fax: +46 (0) 42 33 32 10

www.welchallyn.se

WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™