

Temperatura timpânica

com o Braun ThermoScan® PRO 4000



1. Retire o termómetro do estojo e encaixe o protector de sonda. O aparelho se acenderá.
2. Espere pelo bipe que avisa que o instrumento está pronto e coloque a sonda bem inserida no canal auditivo. A colocação correcta da sonda é essencial para leituras exactas.
3. Prima e solte o botão Start. O termómetro emitirá um bipe. A luz verde ExacTemp acima do botão Start piscará, indicando a colocação correcta da sonda.
4. Um bipe longo e uma luz ExacTemp verde assinalará o final da medição com colocação correcta da sonda.
5. Se a sonda não está posicionada de forma estável durante a medição da temperatura, o aparelho emite bipes, a luz verde ExacTemp apaga-se e aparecem as letra POS (erro de posição).
6. Prima o botão I/O para ver a última temperatura.
7. Para mudar a escala de temperatura: Com o instrumento desligado, prima e mantenha premido o botão I/O durante cerca de 5 segundos. Continue a premir até que apareça no ecrã a escala desejada



WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™

Conselhos para tirar a temperatura timpânica com o Braun ThermoScan® PRO 4000

1. Aplique sempre um protector de sonda. Se o instrumento for colocado no canal auditivo sem um protector de sonda, as lentes devem ser limpas antes da utilização seguinte.
2. Limpe as lentes com um algodão e álcool e deixe secar completamente durante 5 minutos.
3. Usar somente protectores de sonda Braun ThermoScan.
4. As seguintes condições podem prejudicar a exactidão das leituras de temperatura:
 - > Má colocação da sonda
 - > Lentes da sonda sujas, molhadas ou danificadas
 - > Sem protector de sonda ou protector de sonda usado
 - > Temperatura ambiente
 - > Estar deitado sobre um travesseiro
 - > Aparelho auditivo
5. As seguintes condições não prejudicam a exactidão das leituras de temperatura:
 - > Cerume (cera dos ouvidos)
 - > Otitis media (infecção do ouvido)
 - > Tubos de timpanostomia

Welch Allyn European Customer Service
Navan Business Park, Dublin Road,
Navan, County Meath, Ireland
Tel: +353 46 906 7790 Fax: +353 46 906 7754
www.welchallyn.com

BRAUN

WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™