


Örontermometer

med Braun ThermoScan® PRO 4000

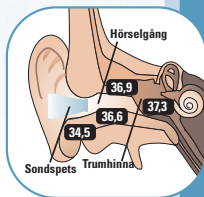

1. Avlägsna termometern från förvaringsboxen och sätt på ett sondskydd. Enheten startar.
2. Vänta tills du hör "redo-pipet" och för in sonden ordentligt i hörselgången. Riktig sondplacering är väsentlig för noggranna avläsningar.
3. Tryck momentant på startknappen. Termometern piper en gång. Den gröna ExacTemp-lampan blinkar för att indikera en stabil placering av proben.
4. En ton och fast sken av den gröna ExacTemp-lampan indikerar att mätningen är slutförd.
5. Om enheten inte hålls stilla under mätningen piper enheten, den gröna ExacTemp-lampan slocknar och POS (felaktig position) visas i enhetens display.
6. Tryck på I/O-knappen för att återkalla den senast avlästa temperaturen.
7. För att ändra temperaturskala: Med instrumentet av, tryck på och håll I/O-knappen nedtryckt ca 5 sekunder. Håll tills önskad skala visas.



WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™

Tips för att mäta temperaturen i örat med Braun ThermoScan® PRO 4000

1. Använd alltid engångsskydd vid mätning. Om enheten används utan skydd måste linsen rengöras innan nästa mätning.
2. Rengör linsen med tops och alkohollösning. Låt sedan linsen torka 5 minuter innan användning.
3. Använd endast Braun ThermoScan engångsskydd.
4. Följande förutsättningar kan ha inverkan på mätresultatet:
 - > Felaktig placering av probe
 - > Smutsiga, våta eller skadade engångsskydd
 - > Inget eller använt sondskydd
 - > Omgivande temperatur
 - > Patienten har legat mot en kudde
 - > Hörapparat
5. Följande förutsättningar har ingen inverkan på mätresultatet:
 - > Öronvax
 - > Öroninflammation
 - > Ventilationsrör i örat

BRAUN

Welch Allyn Sverige,

Verkstadsgatan 12,

263 39 Höganäs

Tel: 042-330 220 Fax: 042-333 210

www.welchallyn.com

WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™