


Braun ThermoScan® PRO 4000



Användning och teknik



1. Avlägsna termometern från förvaringsboxen och sätt på ett sondskydd. Enheten startar.

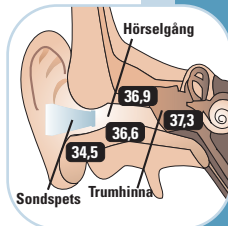

2. Vänta tills du hör "redo-pipet" och för in sonden ordentligt i hörselgången. Riktig sondplacering är väsentlig för noggranna avläsningar.



3. Tryck momentant på startknappen. Termometern piper en gång. Den gröna ExacTemp-lampan blinkar för att indikera en stabil placering av proben.



4. En ton och fast sken av den gröna ExacTemp-lampan indikerar att mätningen är slutförd.



5. Om enheten inte hålls stilla under mätningen piper enheten, den gröna ExacTemp-lampan slocknar och POS (felaktig position) visas i enhetens display.



6. Tryck på I/O-knappen för att återkalla den senast avlästa temperaturen.



7. För att ändra temperaturskala: Med instrumentet av, tryck på och håll I/Oknappen nedtryckt ca 5 sekunder. Håll tills önskad skala visas.

Vad som påverkar noggrannheten

Normalområdet varierar från person till person och kan påverkas av många faktorer

Faktor	Påverkar noggrannheten	
	Ja	Nej
Dålig sondplacering	✓	
Inget sondskydd	✓	
Använt sondskydd	✓	
Omgivningstemperaturen	✓	
Smutsig/skadad lins	✓	
Hörapparat	✓	
Om man legat mot en kudde	✓	
Cerumen (öronvax)		✓
Otitis Media (öroninfektion)		✓
Tympanostomirör		✓

felmeddelanden och lösningar



Inget sondskydd påsatt – Sätt på ett nytt, rent sondskydd.




(POS = positionsfel) Den infraröda monitorn kan inte finna ett jämviktsläge för temperaturen och tillåter inte mätning – Töm skärmen genom att trycka på knappen "Start" en gång. Kontrollera att sonden är i rätt läge och förblir stabil.




Omgivningstemperaturen är inte inom det tillåtna området 10–40 °C eller ändras för snabbt – Låt termometern vara i 30 minuter i ett rum där temperaturen ligger i området 10 till 40 °C.



Systemfel – Vänta 1 minut tills termometern slås av automatiskt. Slå sedan på den igen. **Om felet** fortgår, återställ termometern genom att avlägsna batterierna och sedan sätta in dem igen. **Om felet** ändå inte åtgärdas, kontakta Welch Allyn.

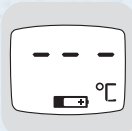

Batteriet är svagt, men termometern fungerar ändå korrekt – Sätt i nya batterier.

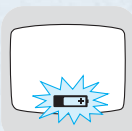

Batteriet är för svagt för att tillåta korrekta temperaturvärden – Sätt i nya batterier.